



1 Wandtaster einschalten

Falls der Wandtaster ausgeschaltet ist, drehen Sie den Schlüssel **A** im Uhrzeigersinn.



2 Lift holen

Betätigen Sie die Taste Auf oder Ab **B** bis der Lift automatisch stoppt.



3 Plattform öffnen

Drücken Sie die Taste Plattform öffnen **C** bis die Plattform und die Sicherheitsschranken vollständig geöffnet sind und automatisch stoppen. Durch Drehen des Schlüssels **A** gegen den Uhrzeigersinn schalten Sie den Wandtaster aus.

4 Auf die Plattform fahren

5 In die Haltestelle fahren

Betätigen Sie die Taste Auf oder Ab **D** am Lift bis Sie in der gewünschten Haltestelle sind.

6 Plattform verlassen

7 Plattform schließen

Falls der Wandtaster ausgeschaltet ist, drehen Sie den Schlüssel **A** im Uhrzeigersinn. Betätigen Sie die Taste Plattform schließen **E** bis diese vollständig geschlossen ist.



8 Wandtaster ausschalten

Durch Drehen des Schlüssels **A** gegen den Uhrzeigersinn schalten Sie den Wandtaster aus.

Falls Sie einen Warnton vom Lift wahrnehmen, befindet sich dieser nicht in der Haltestelle. Fahren Sie den Lift durch Drücken der Tasten Auf oder Ab **B** in die nächste Haltestelle.

